

# CHARMANT ClariShield




## 抜群の透明感&超低反射・防曇のシールド性能

High visibility, Anti-reflective & anti-fogging.

## 超軽量&圧倒的な掛け心地のフレーム性能

Ergonomically designed for maximum fit & function.

- 抜群の透明感に加え、映りこみを極限までカット!  
Highly transparent and reduces reflection.

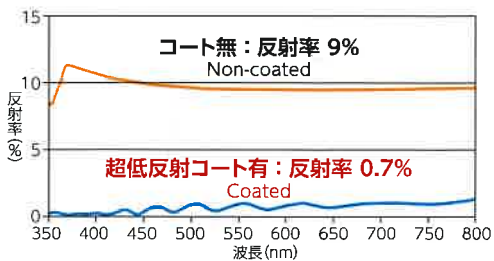

クラリシールド  
61-1001MB (Blue)

超低反射コート有 Coated



コート無 Non-coated

- コート無しの場合は照明の反射による映りこみが発生します。
- Product without anti-reflective coating

- メガネフレームとの併用も可能  
Fit comfortably over eyeglasses




- カラーは3色展開 Color variation



# CHARMANT


## 製品特徴

クラリシールドはシャルマンの頭部データベースと掛け心地の研究からデザインされたフレームに、超高透過と超低反射性を備えたフィルムを組み合わせた、医療安全の向上に最適化された製品です。

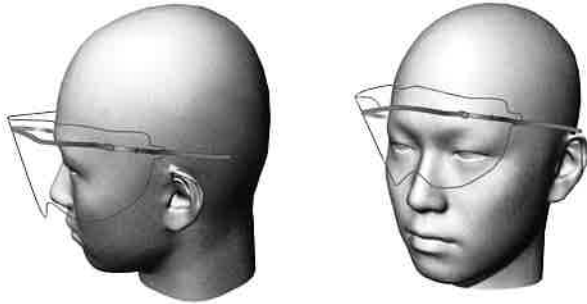


## Product features

ClariShield combines Charmant's scientific study on head measurements to produce the secure and comfortable chassis coupled with a highly transparent and anti-reflective shield.

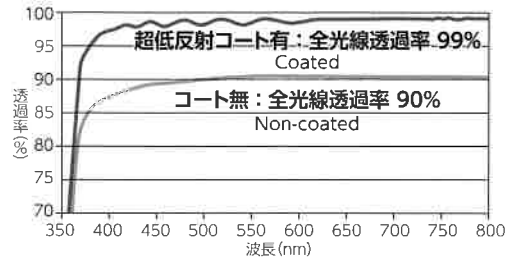


## シールドの取り付け方

## How to assemble your ClariShield

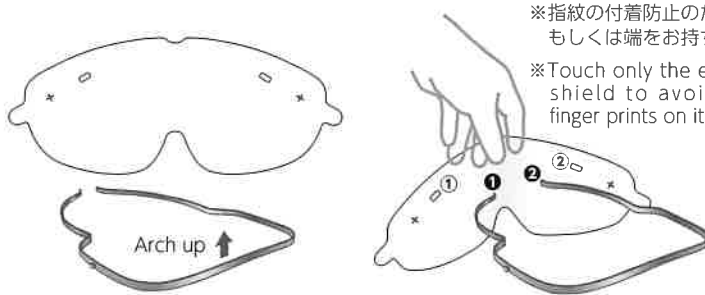

※指紋の付着防止のため、上部もしくは端をお持ちください。

※Touch only the edge of the shield to avoid leaving finger prints on it.

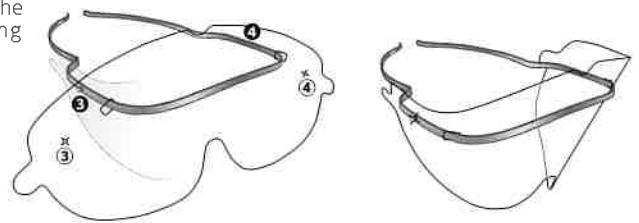

- (1) フレーム及びシールドの上下は図示のようになります。フレームの上下方向にはカーブがあるので、図を参照にご確認ください。
- (2) シールドをフレームに固定する場合はシールドの穴①にフレームの先端部①を、シールドの穴②にフレームの先端部②を通してください。
- (3) シールドをフレームに通した後にシールド穴③をフレーム③に、シールド穴④をフレーム④に入れ込んで固定します。
- (4) シールドがフレームにきちんと固定されているかを確認し、ご使用ください。

1. Identify top and bottom of the chassis and shield as per the drawing.
2. Insert the chassis tips ① and ② into the holes ① and ② on the shield.
3. Align holes ③ and ④ to pins ③ and ④.  
(Hook ③ and ④ to pins ③ and ④)
4. Before using, make sure the shield is securely fixed.

●オプション：10本ラック  
Option : 10 pcs. Rack

Item	SKU	Color	Material	Price
Frame	61-1001MB	Blue	Titanium alloy	5,900円(税別)
	61-1001MG	Green	Titanium alloy	5,900円(税別)
	61-1001MS	Silver	Titanium alloy	5,900円(税別)
Shield (x50pcs.)	61-1100	-	PET/Acrylic resin	10,000円(税別)
Rack	61-1201	-	Acrylic resin	5,000円(税別)

●フレームの仕様(日本製)

本体:チタン合金  
表面処理:陽極酸化

●シールドの仕様(日本製)

PET/アクリル樹脂

●10本掛ラックの仕様(日本製)

アクリル樹脂

●Chassis (made in Japan)


Material : Titanium alloy  
Surface Treatment : Anodic oxidation

●Shield (made in Japan)

Material : PET/Acrylic resin

●10 pcs.Rack(made in Japan)

Material : Acrylic resin

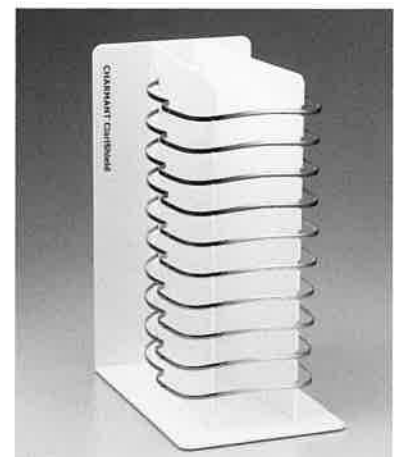

\*製品によって販売されていない地域があります。\* "Not all products are available in all markets."

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 ※Designs and specification subject to change without notice

**CHARMANT**

●お問い合わせ先

株式会社 シャルマン メディカル事業部 カスタマーサービス

〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1

TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 www.charmant-medical.com

2017,09,5000